

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI UTILIZARE

Instalare dispozitiv bluetooth.

- se alimenteaza dispozitivul bluetooth.
- pe tableta:
 - la Setari:
 - se activeaza Bluetooth
 - se alege in lista de dispozitive DIGIMOVE (sau MOTRIX)
 - se imperecheaza dispozitivul (parola: "1234")

Instalare aplicatie

- se acceseaza in browser link-ul la care se afla fisierul de instalare (Move1du.apk)
- se download-eaza fisierul
- se selecteaza fisierul in Downloads
- se alege optiunea de instalare

Utilizare aplicatie

- la pornire, aplicatia face conectarea la dispozitivul bluetooth; conectarea dureaza in mod obisnuit cateva secunde

NOTA. aplicatia se conecteaza in mod implicit la un dispozitiv bluetooth care are in denumire cuvantul 'MOVE'; in cazul in care dispozitivul folosit are alta denumire (de ex. MOTRIX) atunci, dupa lansarea aplicatiei, se intra in Setari, se schimba corespunzator campul denumire dispozitiv, se salveaza setarile si apoi se restarteaza aplicatia.

- in momentul in care de face conectarea, pe bara de stare a aplicatiei apare semnalizarea CONECT, iar pe dispozitiv se aprinde LED-ul care indica conectarea.

- se stabilesc in Setari parametrii doriti pentru exercitiu si se da Salvare

NOTA. setarile salvate se memoreaza si se mentin intre sesiuni, chiar daca echipamentul este oprit

- se da START pentru inceperea exercitiului
- la terminarea numarului de repetari setate sau la apasarea butonului STOP se afiseaza toate repetarile efectuate
- iesirea din aplicatie se face cu butonul EXIT.